

LA SOLUTION SANS CHIRURGIE

Orbera<sup>365</sup><sup>™</sup>  
managed weight loss system

## PERDRE DU POIDS SANS CHIRURGIE



PLUS DE 277 000  
BALLON  
N° 1  
GASTRIQUE  
BALLONS MIS EN PLACE

Perdez 3 fois plus de poids qu'avec un régime et l'activité physique seulement

Suivi sur 12 mois

# COMMENCEZ À PERDRE DU

## VOUS EN AVEZ ASSEZ DE DÉPENSER DE L'ARGENT DANS DES PROGRAMMES DE PERTE DE POIDS PEU CONCLUANTS ?

Le système de perte de poids ORBERA365™ garantit des résultats probants en 6 mois seulement, et peut rester en place jusqu'à 12 mois.

La solution ORBERA365™, c'est l'alliance de la technologie du ballon gastrique et d'une équipe d'experts pour vous soutenir, avec en plus un régime et un programme d'exercices personnalisés. Un programme tout-en-un.


Ce programme complet conjugue l'action du ballon gastrique et l'efficacité durable d'un nouveau mode de vie actif pour vous aider à perdre du poids en toute sécurité.

POIDS AVEC ORBERA365™




# PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ORBERA365™


## LA SOLUTION SANS CHIRURGIE

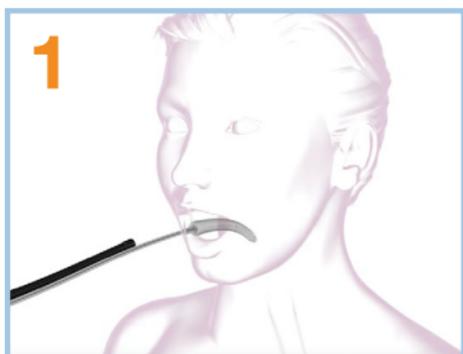

Le ballon ORBERA® est introduit dégonflé dans votre estomac à travers la bouche.

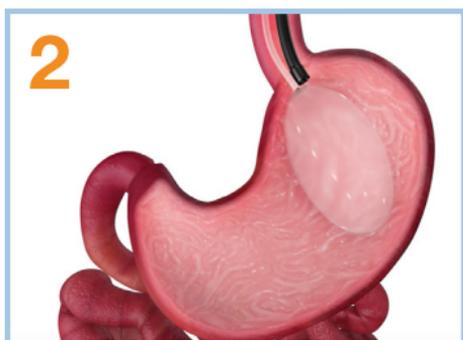


Une seringue de 50 ml est ensuite utilisée pour remplir le ballon d'une solution saline stérile. Une fois rempli, le ballon fait environ la taille d'un pamplemousse.

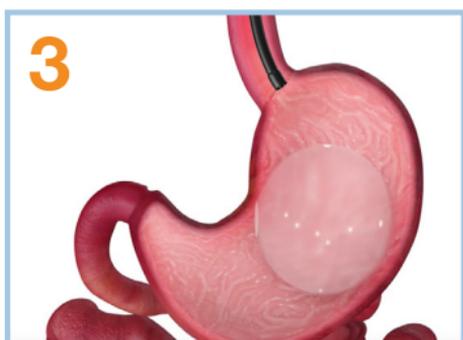

Le ballon gastrique occupe suffisamment de place dans votre estomac pour aider votre corps à se satisfaire de portions alimentaires plus saines.

## AU BOUT DE 12 MOIS (OU MOINS)

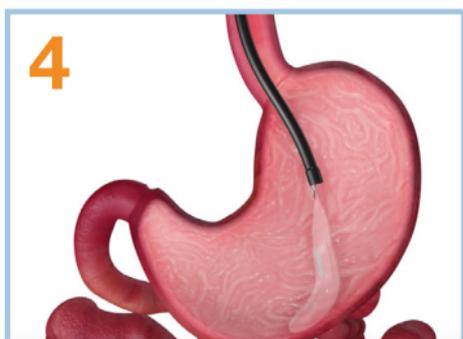

Le ballon est retiré 12 mois plus tard sans aucune procédure chirurgicale.

# ORBERA365™ VOUS AIDE À VOUS SENTIR RASSASIÉ ET À MANGER MOINS LORS DES REPAS.

**12  
MOIS**

## **EN PLACE PENDANT 12 MOIS AVEC UN SUIVI CONSTANT**

Pendant 12 mois, grâce aux conseils et au soutien de leur équipe d'experts, apprenez à modifier votre style de vie et à éviter la reprise de poids.



## **PERTE DE POIDS SANS CHIRURGIE**

ORBERA365™ est une procédure de perte de poids sans chirurgie et réversible qui ne nécessite aucune incision, aucun point de suture et aucune modification anatomique.

**277K**

## **DES RÉSULTATS CONCRETS AU NIVEAU MONDIAL**

Plus de 277 000 ballons gastriques distribués dans le monde.

**20  
ANS**

## **LE PLUS UTILISÉ AU MONDE**

ORBERA® est le ballon de perte de poids le plus utilisé au monde. Depuis plus de 20 ans, il aide des milliers de personnes à atteindre leurs objectifs de perte de poids.

# CONCEPTION DU BALLON OPTIMISÉE

ORBERA® jouit d'une réputation qui repose sur la qualité, la fiabilité et sa position de ballon numéro 1 dans le monde. Les caractéristiques supérieures du ballon ORBERA® contribuent à son excellente réputation et à son succès. Votre ballon gastrique a été conçu spécifiquement pour votre sécurité et pour vous aider à perdre du poids.






## Ultra lisse et parfaitement rond

Le ballon ORBERA365™ se distingue par son absence totale de saillies, de bords anguleux et de surfaces rigides susceptibles d'irriter l'estomac. La conception innovante du ballon ORBERA365™ lui confère une surface parfaitement lisse, souple et ronde, qui ne présente ainsi aucun risque ulcérant pour l'estomac.



## 7+ couches de silicone haute densité

Le ballon gastrique ORBERA365™ est composé d'au moins 7 couches de silicone médical de qualité supérieure pour garantir une durabilité appréciable. Il résiste aisément aux fluides digestifs et à l'acide gastrique pendant 12 mois.

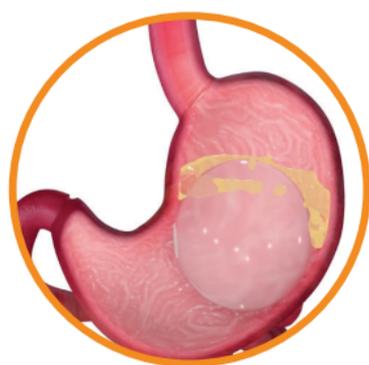

## Une perte de poids efficace

Le ballon ORBERA365™ a été conçu pour occuper suffisamment d'espace dans l'estomac pour favoriser le sentiment de satiété sans occasionner de gêne. La taille et la forme du ballon ORBERA365™ aident les patients à perdre 3 fois plus de poids qu'avec seulement un régime et l'activité physique.



## Une taille optimale et personnalisable

Le ballon ORBERA365™ peut être adapté à votre estomac pour occuper juste l'espace approprié. Le ballon a la taille et la forme d'un pamplemousse. Il peut contenir entre 400 et 700 ml de solution, en fonction de votre estomac.

# LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS

## Combien cela coûte-t-il ?

Le coût total du programme ORBERA365™ varie mais c'est un programme forfaitaire qui comprend généralement le ballon ORBERA®, la procédure de mise en place, la procédure de retrait, les frais d'hospitalisation et le suivi médical et alimentaire pendant 18-24 mois.

## Que ressent-on une fois le ballon installé ?

ORBERA365™ occupe une partie de votre estomac, vous donnant un sentiment de satiété même avec un repas léger. Tout le temps qu'il reste placé dans votre estomac, vous apprenez à vous satisfaire de moins et à réduire les portions.

Votre corps met en général quelques jours à s'adapter au ballon ORBERA365™. La plupart des patients ont indiqué la présence de nausées, de vomissements et de reflux, mais généralement ces phénomènes disparaissent et sont suivis par votre médecin.

## Cela marche-t-il réellement ? Combien de kilos puis-je espérer perdre ?

ORBERA® a aidé des milliers de patients dans le monde entier à perdre leurs kilos récalcitrants. ORBERA® a fait l'objet de plus de 200 études cliniques dans le monde. L'étude d'approbation de la FDA fait état d'une perte de poids 3 fois supérieure à celles obtenues à travers des régimes alimentaires ou la pratique d'activités physiques, ou de 10 % du poids total des patients.

## Les résultats se voient-ils rapidement ?

La perte de poids est rapide, la plus importante se produisant au cours des trois premiers mois après la mise en place du ballon. Le ballon ORBERA365™ peut rester en place pendant 12 mois maximum pour vous laisser le temps de perdre du poids et de modifier votre style de vie. Par ailleurs, plus de 12 mois d'encadrement et de suivi vous permettront d'acquérir les habitudes et les connaissances requises pour éviter de reprendre avec le temps les kilos perdus.

## Et si je reprends du poids ?

En général, pendant toute la période d'utilisation du ballon ORBERA365™ et du suivi qui l'accompagne, les patients adoptent de nouvelles habitudes qui leur permettent de maintenir leur poids, voire de continuer à en perdre. C'est en cela que l'encadrement et le suivi après le retrait du ballon sont très importants. Il arrive cependant, que certains patients reprennent du poids après le retrait du ballon. Selon une étude clinique américaine, les patients avaient en moyenne repris seulement environ 25 % de leur poids dans les 6 mois suivant le retrait du ballon.

« J'ai perdu **14 kg**  
avec ORBERA®  
et depuis **5 ans**,  
je n'ai pas repris  
de poids. »

Grâce à ORBERA®,  
Andrew a perdu 14 kg









**PRÊT À COMMENCER À AIDER  
VOS PATIENTS À PERDRE DU  
POIDS AVEC ORBERA365™ ?**

**N'ATTENDEZ PLUS**

**[www.orbera.com/fr](http://www.orbera.com/fr)**